

# جهاز تسخين الزجاجات الطبية

دليل البدء السريع



ضع الغطاء على الجهاز



ضع الزجاجاة بالداخل.



لا تصب أي ماء!



عند الحاجة، انزع الغطاء وأخرج الزجاجاة أو اتركها دافئة داخل الجهاز (بحد أقصى 120 دقيقة).



عند الوصول إلى درجة حرارة الشرب، تضيء الزاوية باللون الأخضر.




المس الزر حتى تضيء الزاوية باللون الأزرق. خلال مرحلة التسخين، تضيء المصابيح داخل الجهاز وتنطفئ عدة مرات.

## خيارات:



عند إضاءة الضوء الأحمر، يكون الطعام ساخناً جداً. عند وميض الضوء الأحمر، فهذا يشير إلى خطأ في الجهاز. طالع المعلومات في دليل الاستخدام

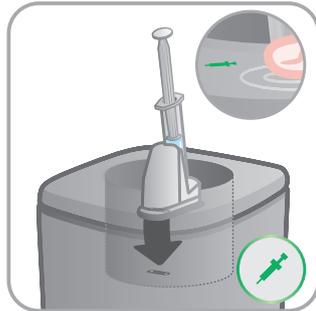

سخن الحقنة في حامل الحقن (يباع بشكل منفصل). تتصل جهات التوصيل بين الحامل وقاعدة الجهاز. يضيء المصباح باللون الأخضر.



إذا كنت بحاجة إلى تسخين سريع: المس الزر لمدة 3 ثوان لتفعيل وضع التعزيز. سيضيء المصباح باللون الأحمر. لإيقافه، المس الزر حتى ينطفئ الضوء الأحمر.



إذابة التجميد: يكتشف أحد المستشعرات ما إذا كان محتوى الزجاجاة أو الحقنة مجمداً، ويبدأ تلقائياً عملية إذابة تجميد لطيفة. تضيء الزاوية باللون الأرجواني.



MEDICPRO  
MAPA CLINICAL SUPPORT