

Клиничен нагревател за бутилки

Ръководство за бърз старт



Не наливайте вода!



Поставете бутилката.



Поставете капака на уреда.



Натиснете бутона, докато ъгълът светне в синьо. По време на фазата на загряване лампите в уреда се включват и изключват няколко пъти.




При достигане на температурата за пиене ъгълът светва в зелено.



Ако е необходимо, отстранете капака и извадете бутилката или я дръжте на топло в уреда (макс. 120 мин.).


Опции

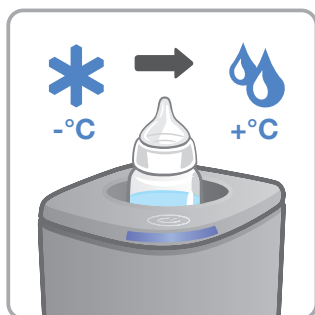

Размразяване: Сензор разпознава дали съдържанието на бутилката или спринцовката е замразено и автоматично започва щадящ процес на размразяване. Њгълът светва в лилаво.



Ако Ви е необходимо бързо действие: Натиснете бутона за 3 секунди, за да активирате режима на усилване. Лампата светва в червено. За изключване натиснете бутона, докато червената лампа изгасне.

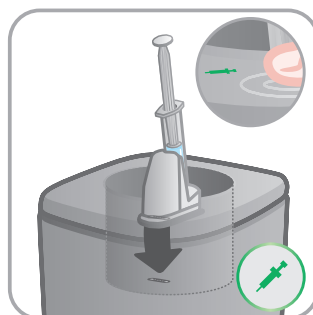

Загрейте спринцовката в стойката за спринцовки (предлага се отделно). Контактите на държача и дъното на уреда се свързват. Лампата светва в зелено.



При червена лампа храната е прекалено топла. При мигаща червена лампа е налице грешка на уреда. Вижте информацията в инструкциите за употреба.



MEDICPRO
MAPA CLINICAL SUPPORT