

Calientabiberones para hospitales

Guía rápida



¡No llenar con agua!



Introduzca el biberón.



Ponga la tapa en el aparato.



Pulse el botón hasta que la esquina se encienda de color azul. En la fase de calentamiento, las luces del aparato se encienden y se apagan varias veces.




Cuando se alcanza la temperatura correcta de alimentación, la esquina se enciende de color verde.




En caso necesario, quite la tapa y saque el biberón, o manténgalo caliente en el aparato (máx. 120 min.).


Opciones

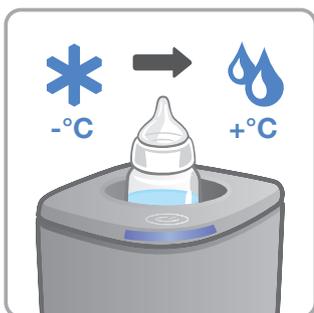

Descongelar: Un sensor detecta si el contenido del biberón o la jeringa está congelado, e inicia automáticamente un proceso de descongelación suave. La esquina se enciende de color violeta.

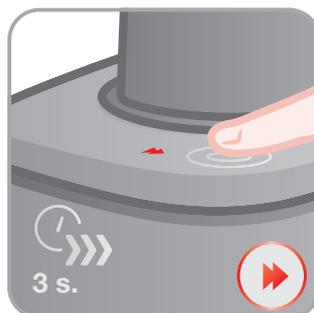

Si tiene prisa: mantenga pulsada la tecla durante 3 segundos para activar el modo Boost. La luz se enciende de color rojo. Para apagar el aparato, pulse el botón hasta que se apague la luz roja.

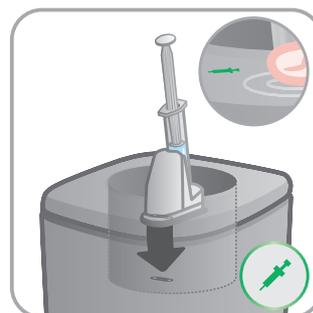

Caliente la jeringa en el soporte para jeringas (disponible por separado). Los contactos del soporte y del fondo del aparato se conectan. La luz se enciende de color verde.



Si la luz se enciende en rojo, el alimento está demasiado caliente. Si la luz parpadea en rojo, hay un error del aparato. Consulte la información en las instrucciones de uso.



MEDICPRO
MAPA CLINICAL SUPPORT