

Kliniczny podgrzewacz do butelek

Krótką instrukcją obsługi



Nie napełniać wodą!



Wstawić butelkę do podgrzewacza.



Nałożyć pokrywę na urządzenie.



Dotknąć przycisku, aż narożnik zaświeci się na niebiesko. W fazie podgrzewania lampki podgrzewacza wielokrotnie włączają się i wyłączają.




Gdy osiągnięta zostanie temperatura podawania pokarmu, narożnik świeci na zielono.



W razie potrzeby zdjąć pokrywę i wyjąć butelkę lub pozostawić ją w podgrzewaczu, aby utrzymać pokarm w stałej temperaturze (maks. 120 min.).


Opcje

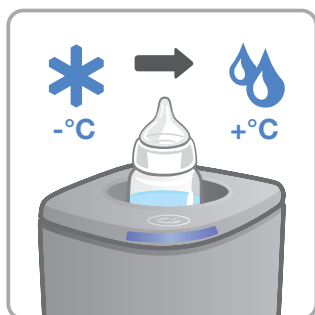

Rozmrażanie: Czujnik rozpoznaje, czy zawartość butelki lub strzykawki jest zamrożona i automatycznie uruchamia delikatny proces rozmrażania. Narożnik świeci na fioletowo.



Jeżeli musi być szybko: Dotknąć przycisk przez 3 sekundy, aby aktywować tryb Boost. Lampka świeci na czerwono. Aby wyłączyć, dotknąć przycisk, aż czerwona lampka zgaśnie.

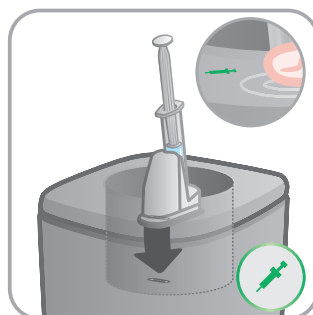

Podgrzewać strzykawkę w uchwycie do strzykawki (zamawianym osobno). Styki uchwytu i podstawy podgrzewacza łączą się ze sobą. Lampka świeci na zielono.



Jeśli lampka świeci na czerwono pokarm jest zbyt gorący. W przypadku migającego czerwonego światła występuje usterka urządzenia. Patrz informacje w instrukcji obsługi.



MEDICPRO
MAPA CLINICAL SUPPORT