

# Kliniksel şişe ısıtıcısı

Hızlı başlama kılavuzu



Su ilave etmeyin!



Şişeyi cihazın içine yerleştirin.



Kapağı cihazın üzerine kapatın.



Köşede mavi ışık yanınca kadar tuşa dokunun. Isıtma aşaması esnasında cihazın içindeki lambalar birkaç kez yanar ve söner.




İçme sıcaklığına ulaşıldığında, köşe kısmı yeşil yanar.




Gerekirse kapağı açın ve şişeyi cihazdan çıkarın veya cihazın içinde sıcak tutmaya devam edin (azm. 120 dk.).


## Seçenekler

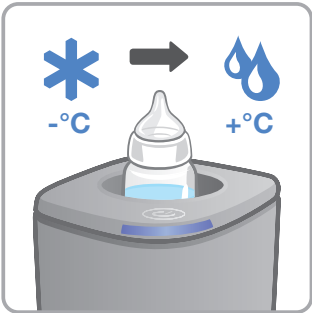

Buzun çözülmesi: Bir sensör, şişenin veya şırınganın içindeki besinin donmuş olup olmadığını tespit eder ve otomatik olarak, yavaş ve hassas bir şekilde buzı çözmeye başlar. Köşedeki ışık mor renkte yanar.

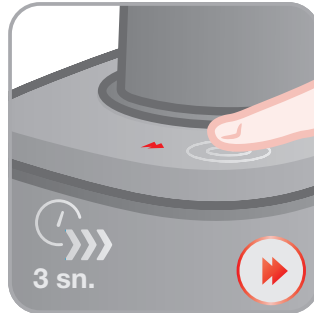

İşlemin daha hızlı olmasını istiyorsanız: Hızlandırma modunu etkinleştirmek için tuşa 3 saniye dokununuz. Lamba kırmızı yanar. Kapatmak için, kırmızı ışık sönene kadar tuşa dokununuz.

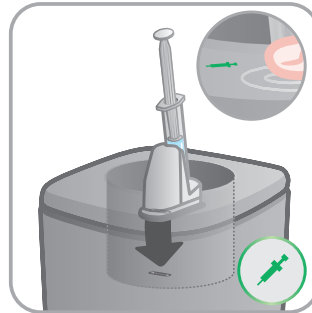

Şırıngayı, şırınga tutucu düzeneği (ayrı olarak alınabilir) içinde ısıtın. Tutucu düzeneğin ve cihaz tabanının kontakları birbirine bağlanır. Lamba yeşil yanar.



Eğer ışık kırmızıysa, yemek çok sıcak demektir. Kırmızı ışık yanıp sönerse, cihazda bir arıza var demektir. Kullanma talimatındaki bilgilere bakın.



**MEDICPRO**  
MAPA CLINICAL SUPPORT