

Клінічний підігрівач пляшок

Коротка інструкція



Не заливайте воду!



Встановіть пляшку.



Накрийте прилад кришкою.



Натискайте кнопку, доки кут не підсвітиться синім. На фазі прогріву лампа приладу кілька разів може увімкнутися-вимкнутися.




По досягненні питної температури кут підсвітиться зеленим.



Залежно від потреби, зніміть кришку й вийміть пляшку або грійте далі (макс. 120 хв).


Опції

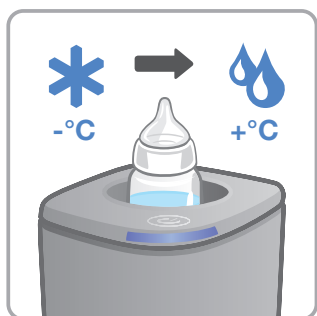

Розморожування: датчик розпізнає, чи не замерз вміст пляшки або шприца, і автоматично починає обережне розморожування. Кут підсвічується фіолетовим.



Якщо ви поспішаєте: натисніть кнопку на 3 с, щоб увімкнути інтенсивний режим. Лампа підсвітиться червоним. Для вимкнення натисніть кнопку, щоб червона лампа згасла.

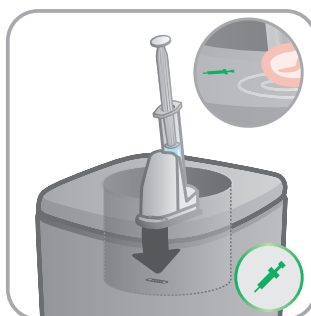

Шприци нагрівайте в спеціальному тримачі (продається окремо). Контакти тримача й дна приладу з'єднуються. Лампа світиться зеленим.



Якщо світло червоне, харчування перегріте. Якщо червоне світло блимає, прилад несправний. Див. інформацію в інструкції.



MEDICPRO
MAPA CLINICAL SUPPORT